


ザヘルス ネラトンカテーテル





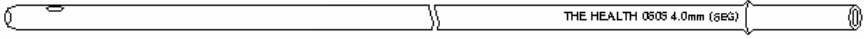

■管理医療機器 ■一般的名称: ネラトンカテーテル ■JMDNコード: 10734000 ■再使用禁止
 ■材質: 天然ゴム製 ■保険償還区分: 請求不可 ■未滅菌品

特 徴

- 天然ゴム製の「導尿用カテーテル」です。
- 液垂れを止めるツバが付いています。

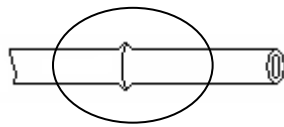

サイズ

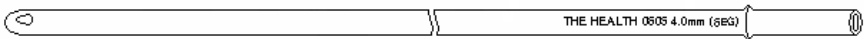タイプ	形 状
標準型	穴形状: ネラトン穴 1  THE HEALTH 0505 4.0mm (SEG) 全長: 330mm
A 型	穴形状: 先穴 1  THE HEALTH 0505 4.0mm (SEG) 全長: 330mm
B 型	穴形状: 先穴 1、側孔 1  THE HEALTH 0505 4.0mm (SEG) 全長: 330mm
C 型	穴形状: 先穴 1、側孔 2  THE HEALTH 0505 4.0mm (SEG) 全長: 330mm

■標準型




製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)	
H-ANS103N	4995407100407	3EG	外径 2.5mm × 330mm	12本/袋 10袋/箱	4,400/袋	
H-ANS104N	4995407100414	4EG	外径 3.0mm × 330mm			
H-ANS105N	4995407100421	5EG	外径 3.5mm × 330mm			
H-ANS106N	4995407100438	6EG	外径 4.0mm × 330mm		4,200/袋	
H-ANS107N	4995407100445	7EG	外径 4.5mm × 330mm			
H-ANS108N	4995407100452	8EG	外径 5.0mm × 330mm			
H-ANS109N	4995407100469	9EG	外径 5.5mm × 330mm			
H-ANS110N	4995407100476	10EG	外径 6.0mm × 330mm			
H-ANS111N	4995407100483	11EG	外径 6.5mm × 330mm			
H-ANS112N	4995407100490	12EG	外径 7.0mm × 330mm			
H-ANS113N	4995407100506	13EG	外径 7.5mm × 330mm		5,400/袋	
H-ANS114N	4995407100513	14EG	外径 8.0mm × 330mm			
H-ANS115N	4995407100520	15EG	外径 8.5mm × 330mm		6本/袋 10袋/箱	16,800/袋
* H-ANS116N	4995407100537	16EG	外径 9.0mm × 330mm			
* H-ANS117N	4995407100544	17EG	外径 9.5mm × 330mm	8,400/袋		
* H-ANS118N	4995407100551	18EG	外径 10.0mm × 330mm			

■A型




製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)	
H-ANA103N	4995407100568	3EG	外径 2.5mm × 330mm	12本/袋 10袋/箱	5,500/袋	
H-ANA104N	4995407100575	4EG	外径 3.0mm × 330mm			
H-ANA105N	4995407100582	5EG	外径 3.5mm × 330mm			
H-ANA106N	4995407100599	6EG	外径 4.0mm × 330mm		5,300/袋	
H-ANA107N	4995407100605	7EG	外径 4.5mm × 330mm			
H-ANA108N	4995407100612	8EG	外径 5.0mm × 330mm			
H-ANA109N	4995407100629	9EG	外径 5.5mm × 330mm			
H-ANA110N	4995407100636	10EG	外径 6.0mm × 330mm			
H-ANA111N	4995407100643	11EG	外径 6.5mm × 330mm			
H-ANA112N	4995407100650	12EG	外径 7.0mm × 330mm			
H-ANA113N	4995407100667	13EG	外径 7.5mm × 330mm		6,300/袋	
H-ANA114N	4995407100674	14EG	外径 8.0mm × 330mm			
H-ANA115N	4995407100681	15EG	外径 8.5mm × 330mm		6本/袋 10袋/箱	16,800/袋
* H-ANA116N	4995407100698	16EG	外径 9.0mm × 330mm			
* H-ANA117N	4995407100704	17EG	外径 9.5mm × 330mm	8,400/袋		
* H-ANA118N	4995407100711	18EG	外径 10.0mm × 330mm			

■B型

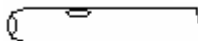

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)	
H-ANB103N	4995407100728	3EG	外径 2.5mm × 330mm	12本/袋 10袋/箱	6,000/袋	
H-ANB104N	4995407100735	4EG	外径 3.0mm × 330mm			
H-ANB105N	4995407100742	5EG	外径 3.5mm × 330mm			
H-ANB106N	4995407100759	6EG	外径 4.0mm × 330mm		5,700/袋	
H-ANB107N	4995407100766	7EG	外径 4.5mm × 330mm			
H-ANB108N	4995407100773	8EG	外径 5.0mm × 330mm			
H-ANB109N	4995407100780	9EG	外径 5.5mm × 330mm			
H-ANB110N	4995407100797	10EG	外径 6.0mm × 330mm			
H-ANB111N	4995407100803	11EG	外径 6.5mm × 330mm			
H-ANB112N	4995407100810	12EG	外径 7.0mm × 330mm			
H-ANB113N	4995407100827	13EG	外径 7.5mm × 330mm		6,600/袋	
H-ANB114N	4995407100834	14EG	外径 8.0mm × 330mm			
H-ANB115N	4995407100841	15EG	外径 8.5mm × 330mm		6本/袋 10袋/箱	16,800/袋
* H-ANB116N	4995407100858	16EG	外径 9.0mm × 330mm			
* H-ANB117N	4995407100865	17EG	外径 9.5mm × 330mm	8,400/袋		
* H-ANB118N	4995407100872	18EG	外径 10.0mm × 330mm			

■ C 型

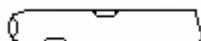

製品番号	JAN コード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ANC103N	4995407100889	3EG	外径 2.5mm × 330mm	12 本/袋 10 袋/箱	6,100/袋
H-ANC104N	4995407100896	4EG	外径 3.0mm × 330mm		
H-ANC105N	4995407100902	5EG	外径 3.5mm × 330mm		
H-ANC106N	4995407100919	6EG	外径 4.0mm × 330mm		
H-ANC107N	4995407100926	7EG	外径 4.5mm × 330mm		
H-ANC108N	4995407100933	8EG	外径 5.0mm × 330mm		
H-ANC109N	4995407100940	9EG	外径 5.5mm × 330mm		
H-ANC110N	4995407100957	10EG	外径 6.0mm × 330mm		
H-ANC111N	4995407100964	11EG	外径 6.5mm × 330mm		
H-ANC112N	4995407100971	12EG	外径 7.0mm × 330mm		
H-ANC113N	4995407100988	13EG	外径 7.5mm × 330mm		
H-ANC114N	4995407100995	14EG	外径 8.0mm × 330mm		
H-ANC115N	4995407101008	15EG	外径 8.5mm × 330mm		
* H-ANC116N	4995407101015	16EG	外径 9.0mm × 330mm		
* H-ANC117N	4995407101022	17EG	外径 9.5mm × 330mm		6 本/袋 10 袋/箱
* H-ANC118N	4995407101039	18EG	外径 10.0mm × 330mm		

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

※ * 印は受注生産品になります。

操作方法

- ・滅菌前に水洗をすること。アスピレーター等を用いて内部に勢いよく水道水を通すと、なお良い。
 - ・完全に乾燥させる。
 - ・本品は未滅菌品である。必ず高圧蒸気滅菌(121°C、15 分間)または医療機関で使用されるエチレンオキサイドガス滅菌装置により、EOG滅菌(450~1000mg/L濃度のエチレンオキサイドガスを使用、滅菌 2 時間 70°C未満、加湿下、エアレーションは使用前まで 24 時間以上 70°C 未満)を行った上で使用すること。また、両方の滅菌方法とも、インジケーター等を用いて滅菌効果を確認しながら実施すること
1. 滅菌手袋を装着した右手でネラトンカテーテルを持ち、キシロカインゼリー等の潤滑剤を滅菌ガーゼに載せて、カテーテル先端からシャフト部分に十分塗布する。
 2. 男性患者の場合は、仰臥位をとらせ、陰茎を真上に立たせるように持ち上げて、そのまま保持しながらネラトンカテーテルの先端を外尿道口に挿入する。
 3. 挿入は、尿道の長さ(男性:16~20cm、女性:約 4 cm)を目安に、ゆっくり進める。その際、かん子を使用してカテーテルを保持しても良い。
 4. カテーテル先端が膀胱内に進入したら、採尿瓶や採尿バックを用いて尿を採尿する。

主要文献

- (1) 荒川創一.尿道カテーテルによる感染を起こさないための看護:INFECTION CONTROL,5(3)42-45,1996
- (2) 畑尾正彦 他 監修. 導尿、ナースのためのチューブ管理マニュアル:学研.200-205,1998
- (3) 都筑正和 監修.消毒剤の使い方 4 消毒の実際:医歯薬出版.殺菌・消毒マニュアル,66・97,2000
- (4) 松永佳世子、矢上晶子.ラテックスアレルギー安全対策ガイドライン 2006 誕生編および皮膚科編:日本ラテックスアレルギー研究会会誌 vol.10 No.1,32-40,2006

使用上の注意

- この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施して下さい。
- この製品は医療機器です。取扱いについては教育された医療従事者が適切に行ってください。
- この製品は未滅菌タイプですので、必ず滅菌をした上で使用して下さい。
- この製品の使用に際しては、この製品の使用目的のみとし、他の目的に使用しないで下さい。
- 再使用はしないで下さい。
- 万一この製品にキズ、異物、劣化などがあった場合は、無理に使用せず、弊社までお問い合わせ下さい。
- 直射日光、高温多湿、水ぬれを避けて冷暗所に保管して下さい。

取扱店

製造販売業者 **株式会社イズモヘルス**

URL <https://www.izumo-health-t.com>

■本 社 長野県安曇野市明科七貴 6057 番地 (〒399-7104)

TEL 0263-62-2392 FAX 0263-62-4548