

# ザヘルス シリコンネラトンカテーテル

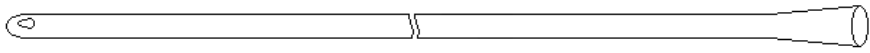
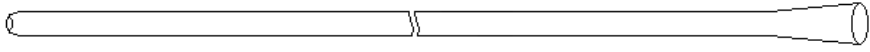
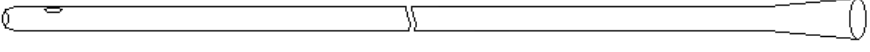
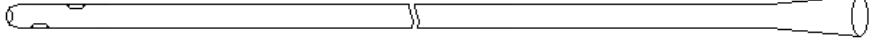


■管理医療機器 ■一般的名称:ネラトンカテーテル・腸管用チューブ・気管支吸引用カテーテル ■保険償還区分:請求不可  
 ■JMDNコード:10734000・35415020・31249000 ■再使用禁止 ■材質:シリコンゴム製 ■未滅菌品

## 特徴

- シリコンゴム製の「導尿用カテーテル」です。
- 「腸洗浄用」や「気管支吸引用」としてもご使用できます。
- 接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジや各種コネクタ等と接続しやすい構造です。

## サイズ

タイプ	形状
標準型	穴形状: ネラトン穴 1  全長: 360mm
A 型	穴形状: 先穴 1  全長: 360mm
B 型	穴形状: 先穴 1、側孔 1  全長: 360mm
C 型	穴形状: 先穴 1、側孔 2  全長: 360mm

■標準型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ASS104Q	4995407101961	4EG	外径 3.0mm × 360mm	1本/袋 12袋/箱	1,140/袋
H-ASS105Q	4995407101978	5EG	外径 3.5mm × 360mm		
H-ASS106Q	4995407101985	6EG	外径 4.0mm × 360mm		
H-ASS107Q	4995407101992	7EG	外径 4.5mm × 360mm		
H-ASS108Q	4995407102005	8EG	外径 5.0mm × 360mm		
H-ASS109Q	4995407102012	9EG	外径 5.5mm × 360mm		
H-ASS110Q	4995407102029	10EG	外径 6.0mm × 360mm		1,170/袋
H-ASS111Q	4995407102036	11EG	外径 6.5mm × 360mm		
H-ASS112Q	4995407102043	12EG	外径 7.0mm × 360mm		
H-ASS113Q	4995407102050	13EG	外径 7.5mm × 360mm		
H-ASS114Q	4995407102067	14EG	外径 8.0mm × 360mm		
H-ASS115Q	4995407102074	15EG	外径 8.5mm × 360mm		

■A型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ASA104Q	4995407102081	4EG	外径 3.0mm × 360mm	1本/袋 12袋/箱	1,180/袋
H-ASA105Q	4995407102098	5EG	外径 3.5mm × 360mm		
H-ASA106Q	4995407102104	6EG	外径 4.0mm × 360mm		
H-ASA107Q	4995407102111	7EG	外径 4.5mm × 360mm		
H-ASA108Q	4995407102128	8EG	外径 5.0mm × 360mm		
H-ASA109Q	4995407102135	9EG	外径 5.5mm × 360mm		
H-ASA110Q	4995407102142	10EG	外径 6.0mm × 360mm		1,230/袋
H-ASA111Q	4995407102159	11EG	外径 6.5mm × 360mm		
H-ASA112Q	4995407102166	12EG	外径 7.0mm × 360mm		
H-ASA113Q	4995407102173	13EG	外径 7.5mm × 360mm		
H-ASA114Q	4995407102180	14EG	外径 8.0mm × 360mm		
H-ASA115Q	4995407102197	15EG	外径 8.5mm × 360mm		

■B型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ASB104Q	4995407102203	4EG	外径 3.0mm × 360mm	1本/袋 12袋/箱	1,290/袋
H-ASB105Q	4995407102210	5EG	外径 3.5mm × 360mm		
H-ASB106Q	4995407102227	6EG	外径 4.0mm × 360mm		
H-ASB107Q	4995407102234	7EG	外径 4.5mm × 360mm		
H-ASB108Q	4995407102241	8EG	外径 5.0mm × 360mm		
H-ASB109Q	4995407102258	9EG	外径 5.5mm × 360mm		
H-ASB110Q	4995407102265	10EG	外径 6.0mm × 360mm		1,340/袋
H-ASB111Q	4995407102272	11EG	外径 6.5mm × 360mm		
H-ASB112Q	4995407102289	12EG	外径 7.0mm × 360mm		
H-ASB113Q	4995407102296	13EG	外径 7.5mm × 360mm		
H-ASB114Q	4995407102302	14EG	外径 8.0mm × 360mm		
H-ASB115Q	4995407102319	15EG	外径 8.5mm × 360mm		

■C型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ASC104Q	4995407102326	4EG	外径 3.0mm × 360mm	1本/袋 12袋/箱	1,420/袋
H-ASC105Q	4995407102333	5EG	外径 3.5mm × 360mm		
H-ASC106Q	4995407102340	6EG	外径 4.0mm × 360mm		
H-ASC107Q	4995407102357	7EG	外径 4.5mm × 360mm		
H-ASC108Q	4995407102364	8EG	外径 5.0mm × 360mm		
H-ASC109Q	4995407102371	9EG	外径 5.5mm × 360mm		
H-ASC110Q	4995407102388	10EG	外径 6.0mm × 360mm		1,470/袋
H-ASC111Q	4995407102395	11EG	外径 6.5mm × 360mm		
H-ASC112Q	4995407102401	12EG	外径 7.0mm × 360mm		
H-ASC113Q	4995407102418	13EG	外径 7.5mm × 360mm		
H-ASC114Q	4995407102425	14EG	外径 8.0mm × 360mm		
H-ASC115Q	4995407102432	15EG	外径 8.5mm × 360mm		

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

## 操作方法

・本品は未滅菌品である。必ず高圧蒸気滅菌(121℃、15 分間)または医療機関で使用されるエチレンオキサイドガス滅菌装置により、EOG滅菌(450~1000mg/L濃度のエチレンオキサイドガスを使用、滅菌 2 時間 70℃未満、加湿下、エアレーションは使用前まで 24 時間以上 70℃ 未満)を行った上で使用すること。また、両方の滅菌方法とも、インジケーター等を用いて滅菌効果を確認しながら実施すること。

### (導尿用としての使用方法)

1. 滅菌手袋を装着した右手でカテーテルを持ち、キシロカインゼリー等の潤滑剤を滅菌ガーゼに載せて、カテーテル先端からシャフト部分に十分塗布する。
2. 男性患者の場合は、仰臥位をとらせ、陰茎を立たせるように持ち上げて、そのまま保持しながらカテーテルを外尿道口から挿入する。
3. 挿入は、尿道の長さ(男性:16~20cm、女性:約 4 cm)を目安に、ゆっくり進める。その際、かん子を使用してカテーテルを保持しても良い。
4. カテーテル先端が膀胱内に進入したら、採尿瓶や採尿バックを用いて尿を採尿する。

### (直腸用としての使用方法)

1. 腸内洗浄液の選択並びに1回投与量、時間及び回数など洗腸方法については、医師の指導に従うこと。
2. 洗浄液(約 37℃)をイルリガートルに投入し、カテーテルまで充填し、クレンメで止める。
3. カテーテル先端部分の適切な長さを経肛門的に(人工肛門含む)挿入し、腸内洗浄液の注入、洗浄及び排水を繰り返し行う。

### (分泌物吸引用としての使用方法)

1. 手指を洗い、プラスチックグローブ、ビニールエプロン、サージカルマスクを装着する。
2. カテーテルの接続部を持ち、吸引チューブと接続し、せっしでカテーテル先端を持つ。
3. カテーテルは、あらかじめ洗浄水を吸引し、内腔のすべりを良くしておく。
4. 吸引圧をかけないまま、カテーテルを挿入する。
5. 十分な深さまで挿入後、粘膜を傷つけないように吸引圧(10.7~15.9kPa)をかけ、カテーテルを引きながら吸引する。

## 主要文献

- (1) 荒川創一.尿道カテーテルによる感染を起こさないための看護:INFECTION CONTROL,5(3)42-45,1996
- (2) 畑尾正彦 他 監修. 導尿、ナースのためのチューブ管理マニュアル:学研.200-205,1998
- (3) 都筑正和 監修.消毒剤の使い方 4 消毒の実際:医歯薬出版.殺菌・消毒マニュアル,66・97,2000

## 使用上の注意

- この製品は医療機器です。御使用に際しては、教育を受けた医療従事者が確実に行って下さい。
- この製品はシリコンゴム製です。シリコンゴムは、-50℃から+250℃の広い範囲でゴムの弾性が失われませんが、引き裂きに弱いため鋭利なものなどには御注意下さい。また、耐薬品性には優れています。
- この製品は未滅菌製品です。必ず滅菌をした上で御使用下さい。
- この製品の使用は1回のみとし、再使用はしないで下さい。
- この製品の使用に際しては、この製品の使用目的のみとし、他の目的に使用しないで下さい。
- 万一この製品にキズ、異物、劣化などがあった場合は、無理に使用せず、弊社までお問い合わせ下さい。
- 直射日光、高温多湿、水ぬれを避けて冷暗所に保管して下さい。

## ザ ヘルス ネラトンカテーテル

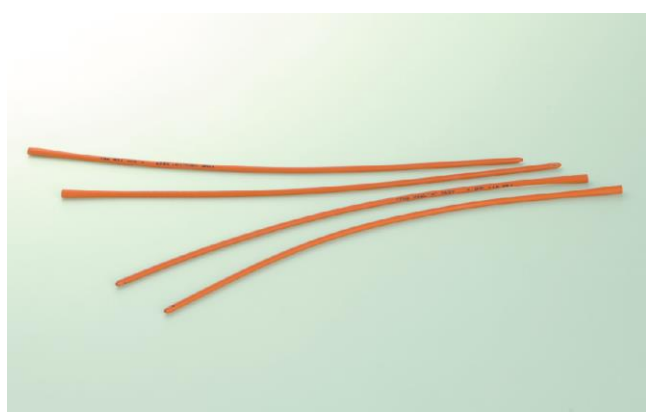
医療機器認証番号: 20600BZZ01067000



- 管理医療機器 ■一般的名称: ネラトンカテーテル
- JMDNコード: 10734000 ■再使用禁止
- 材質: 天然ゴム製 ■保険償還区分: 請求不可
- 未滅菌品

## ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル


医療機器承認番号: 21100BZZ00249000



- 管理医療機器 ■一般的名称: ネラトンカテーテル・腸管用チューブ・気管支吸引用カテーテル
- JMDNコード: 10734000・35415020・31249000
- 再使用禁止 ■材質: 天然ゴム製
- 保険償還区分: 請求不可 ■ガンマ線滅菌済

## ザ ヘルス チーマンカテーテル

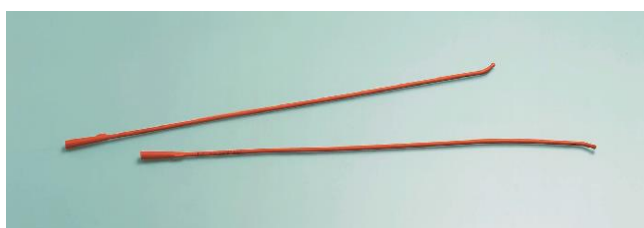医療機器認証番号: 15500BZZ00198000



- 管理医療機器 ■一般的名称: 先端オリーブ型カテーテル
- JMDNコード: 10737000
- 再使用禁止 ■材質: 天然ゴム製
- 保険償還区分: 請求不可 ■未滅菌品

取扱店

製造販売業者 **株式会社イズモヘルス**

URL <https://www.izumo-health-t.com>

■本社 長野県安曇野市明科七貴 6057 番地 (〒399-7104)  
TEL 0263-62-2392 FAX 0263-62-4548