


ザヘルス チーマンカテーテル




■管理医療機器 ■一般的名称: 先端オリーブ型カテーテル ■JMDNコード: 10737000 ■再使用禁止
 ■材質: 天然ゴム製 ■保険償還区分: 請求不可 ■未滅菌品

特徴

- 尿道狭窄患者向け天然ゴム製の「導尿用カテーテル」です。
- 接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジや各種コネクター等と接続しやすい構造です。
- 挿入した際、先端の向きが分かるようにガイドが付いています。

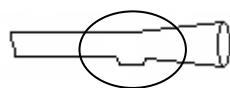

サイズ

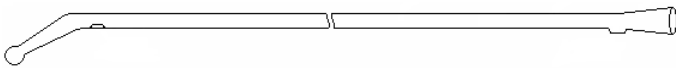タイプ	形状
標準型	穴形状: 側孔 1  全長: 407mm

■標準型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ATS108N	4995407101619	8Fr	外径 2.7mm × 407mm	12本/袋 10袋/箱	19,800/袋
H-ATS110N	4995407101633	10Fr	外径 3.3mm × 407mm		
H-ATS112N	4995407101657	12Fr	外径 4.0mm × 407mm		
H-ATS114N	4995407101671	14Fr	外径 4.7mm × 407mm		
H-ATS116N	4995407101695	16Fr	外径 5.3mm × 407mm		
H-ATS118N	4995407101718	18Fr	外径 6.0mm × 407mm		
H-ATS120N	4995407101732	20Fr	外径 6.7mm × 407mm	6本/袋 10袋/箱	9,900/袋
* H-ATS122N	4995407101756	22Fr	外径 7.3mm × 407mm		12,870/袋
* H-ATS124N	4995407101763	24Fr	外径 8.0mm × 407mm		
* H-ATS126N	4995407101770	26Fr	外径 8.7mm × 407mm		
* H-ATS128N	4995407101787	28Fr	外径 9.3mm × 407mm		
* H-ATS130N	4995407101794	30Fr	外径 10.0mm × 407mm		

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。
 ※ * 印は受注生産品になります。

操作方法

- ・滅菌前に水洗をすること。アスピレーター等を用いて内部に勢いよく水道水を通すと、なお良い。
- ・完全に乾燥させる。
- ・本品は未滅菌品である。必ず高圧蒸気滅菌(121℃、15 分間)または医療機関で使用されるエチレンオキサイドガス滅菌装置により、EOG滅菌(450～1000mg/L濃度のエチレンオキサイドガスを使用、滅菌 2 時間 70℃未満、加湿下、エアレーションは使用前まで 24 時間以上 70℃ 未満)を行った上で使用すること。また、両方の滅菌方法とも、インジケーター等を用いて滅菌効果を確認しながら実施すること。

1. カテーテルに滅菌(EOG 法又は高圧蒸気滅菌法)を施す。
2. 術者の手指を洗浄後、消毒綿等を用いて患者の外尿道口を清拭する。
3. 滅菌手袋を装着した右手でチーマンカテーテルを持ち、キシロカインゼリー等の潤滑剤をカテーテル先端からシャフト部分に十分塗布する。
4. 患者に仰臥位をとらせ、陰茎を立たせるように持ち上げて、患者の頭部方向に倒しながら牽引する。そのまま保持しながらカテーテルの先端屈曲側を、頭部方向に向けて、外尿道口から挿入する。陰茎を真上に牽引した角度のまま挿入しないこと。
5. 挿入中はカテーテルを回転させることなく、ロート部手前にあるガイドの位置が、常に患者の頭部方向にあることを確認しながら、膀胱まで尿道内をゆっくり進める。なお、その後、かん子を使用してカテーテルを保持しても良い。
6. カテーテル先端が膀胱内に進入したら、陰茎を患者の足側に向けて、接続口から膿盆等の採尿用具に尿を排出する。開放式採尿バッグを用いる時は、確実に接続し、膀胱より低位置にバッグを置く。尿器や膿盆を用いる時は、ベッド上に置き、尿の飛散が無いように留意する。いずれも清潔操作を心がけ、泌尿器への感染防止につとめる。
7. 導尿後、カテーテルを抜去するときは、カテーテルを回転させずにゆっくりと患者頭部方向に引く。

主要文献

- (1) 荒川創一.尿道カテーテルによる感染を起こさないための看護:INFECTION CONTROL,5(3)42-45,1996
- (2) 畑尾正彦 他 監修. 導尿、ナースのためのチューブ管理マニュアル:学研.200-205,1998
- (3) 都筑正和 監修.消毒剤の使い方 4 消毒の実際:医歯薬出版.殺菌・消毒マニュアル,66・97,2000
- (4) 松永佳世子、矢上晶子.ラテックスアレルギー安全対策ガイドライン 2006 誕生編および皮膚科編:日本ラテックスアレルギー研究会会誌 vol.10 No.1,32-40,2006

使用上の注意

- この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施して下さい。
- この製品は医療機器です。取扱いについては教育された医療従事者が適切に行ってください。
- この製品は未滅菌タイプですので、必ず滅菌をした上で使用して下さい。
- この製品の使用に際しては、この製品の使用目的のみとし、他の目的に使用しないで下さい。
- 再使用はしないで下さい。
- 万一この製品にキズ、異物、劣化などがあった場合は、無理に使用せず、弊社までお問い合わせ下さい。
- 直射日光、高温多湿、水ぬれを避けて冷暗所に保管して下さい。

ザ ヘルス ネラトンカテーテル


医療機器認証番号: 20600BZZ01067000



- 管理医療機器 ■一般的名称: ネラトンカテーテル
- JMDNコード: 10734000 ■再使用禁止
- 材質: 天然ゴム製 ■保険償還区分: 請求不可
- 未滅菌品

ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル

医療機器承認番号: 21100BZZ00249000

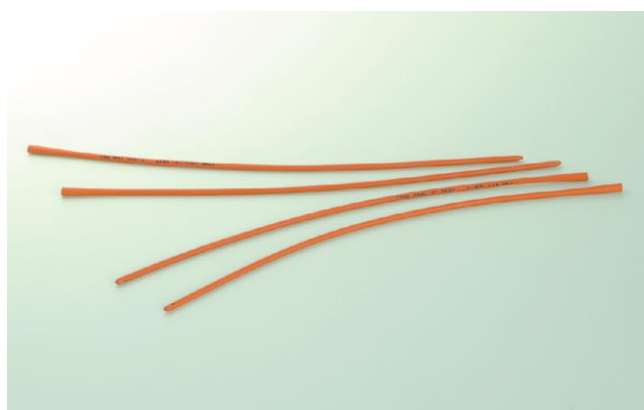

- 管理医療機器 ■一般的名称: ネラトンカテーテル・腸管用チューブ・気管支吸引用カテーテル
- JMDNコード: 10734000・35415020・31249000
- 再使用禁止 ■材質: 天然ゴム製
- 保険償還区分: 請求不可 ■ガンマ線滅菌済

ザ ヘルス シリコンネラトンカテーテル

医療機器承認番号: 16300BZZ00983000



- 管理医療機器 ■一般的名称: ネラトンカテーテル・腸管用チューブ・気管支吸引用カテーテル
- JMDNコード: 10734000・35415020・31249000
- 再使用禁止 ■材質: シリコンゴム製
- 保険償還区分: 請求負荷 ■未滅菌品

取扱店

製造販売業者 **株式会社イズモヘルス**

URL <https://www.izumo-health-t.com>

■本社 長野県安曇野市明科七貴 6057 番地 (〒399-7104)
TEL 0263-62-2392 FAX 0263-62-4548