

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 鼻用洗浄器 JMDN : 41599000

ザヘルス 鼻用洗浄器

【警告】

〈使用方法〉

- ・本品に高温(70℃以上)を加えないこと。
- 〔部品が破損し、本品が機能しなくなる場合がある〕


【禁忌・禁止】

〈適用対象(患者)〉

- ・過去に「天然ゴム」によるアレルギー症状を経験している方の使用は禁止。

【形状、構造及び原理等】

本品は、先端に鼻腔用のノズル、末端に洗浄液吸引用の弁を装着し、その間に中弁、球状のスポイトを有する手動式の鼻腔洗浄器である。

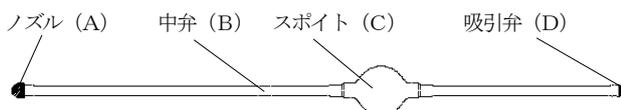

本品は天然ゴムを使用している。

【使用目的又は効果】

洗浄液を鼻腔から注入し、鼻腔内を洗浄する目的で使用
する器具である。

【使用方法等】

1. 吸引弁(D)を水又はぬるま湯に入れ、球状のスポイト(C)を手で握って離す動作を繰り返す事で、加圧操作を反復させ、内部に水又はぬるま湯を充填させてはノズル(A)から吐出させる動作を数回繰り返し、本品内部を洗浄してから使用すること。
2. 洗浄液は、通常市販の鼻用洗浄液を用いるが、生理食塩水(生食)を、水道水を用いて自ら調整する場合は、10分以上沸騰させた「湯冷まし」を用意し、食塩(ヨード化していない物が望ましい)を加えて、0.9%濃度に正確に調整し、液の温度が25~30℃であることを確認する。
3. 吸引弁(D)を洗浄液に入れ、球状のスポイト(C)を手で握って離す動作を数回繰り返し、加圧操作を反復させ、水又はぬるま湯を十分に吐出させると共に、スポイト(C)内部に洗浄液を充填させる。
4. 頭を前屈させた姿勢でノズル(A)を鼻腔に入れ、ゆっくりとスポイト(C)を握り、洗浄液を押し出して鼻腔内洗浄を行う。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
 - ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
2. 重要な基本的注意
 - ・洗浄液の温度には十分注意し、やけどに気をつけること。
 - ・洗浄は持続的に行わず、時々中断すること。又、洗浄中の嚥下運動は避けること。
 - ・孔を開けるなどの追加加工を施したり、鼻腔洗浄以外の目的に使用しないこと。
 - ・使用後は水又はぬるま湯で洗浄し、よく水を切り陰干しすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・直射日光、高温多湿、水ぬれを避けて保管すること。
2. 使用の期限
 - ・包装の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社 イズモヘルス

〒399-7104

長野県安曇野市明科七貴6057番地

TEL:0263-62-2392

製造業者:株式会社 イズモヘルス