

機械器具 13 聴診器
一般医療機器 機械式聴診器 JMDN : 13755000

ザヘルス 象牙聴診器

【禁忌・禁止】

〈適用対象(患者)〉


- ・過去に「天然ゴム」によるアレルギー症状を経験している方は使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

・構造

本品は、チェストピース、Y字管、ゴムチューブ、イヤープースで構成される。

・形状

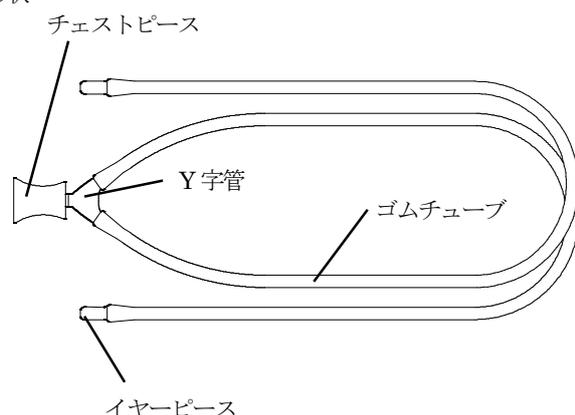

・原材料

チェストピース、Y字管、イヤープースは象牙製である。
ゴムチューブは天然ゴムである。

・原理

チェストピースで集音した音を、Y字管により分岐し、ゴムチューブを通じて、イヤープースに伝える構造である。

【使用目的又は効果】

体内の音を、両耳に挿入したイヤープースにより聴くことができる、中空の機械式の聴取装置である。

【使用方法等】

イヤープースを両耳に装着し、チェストピースを聴取部分の皮膚に密着させることで、心臓または肺の音を聴取する。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、専門医に相談すること。

2. その他の注意

- ・本品に穴を開けるなどの追加加工を施したり、聴取以外の目的に使用しないこと。
- ・外耳孔のサイズは個人差がございます。本品のイヤープースはその材質と構造により、外耳孔の大きさ、かたちの違いに符合させることはできません。無理に挿入して外耳を傷つけないよう注意すること。
- ・濡れたり汚れてしまったときは薄めた中性洗剤に布巾を浸し、よく絞って汚れを拭き取り、乾いた布で拭いてから乾燥させること。
- ・象牙は冷暖房で乾燥した場所や、直射日光、直接風が当たる場所に放置したり、強い衝撃を受けることによって、欠けや亀裂を生じることがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・直射日光、高温多湿、水ぬれを避けて保管すること。
- ・本製品は経年により、象牙部品については黄ばみやひび割れ、ゴム部分についてはひび割れ、表面のベタつき等劣化の症状が発現致します。必要に応じて各部品を交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 イズモヘルス

〒399-7104

長野県安曇野市明科七貴6057番地

TEL : 0263-62-2392

製造業者：株式会社 イズモヘルス